



トヨタ ハイメディック用セット

日産 パラメディック用セット

OH アングルセット

SAKAI

新型コロナウイルスのような感染症の救急隊員
搬送スタッフへの拡大を防ぐために生まれた商品です

- 強力両面テープ付きアングルセット一式
- コーナー用ゴムアングル 1個
- クリップ 20個・固定用ビス
- クリップ落下防止用紐 15本
- 感染症対策ビニールカーテン (クリア 1本)

車体に直接テープ付きビニールカーテンを貼り付けると、材質や表面状態により剥がれやすい事があります。当製品ではテープの接着を助け、また取り外し時は剥がれやすいように設計されています。



青ラインガアングル設置部分

アングル設置後


カーテン準備完了



カーテンは設置後、クリップでまとめておくと邪魔にならず、下ろした際に下にクリップを留めて重りにすると風煽りを軽減する事ができます。



束ねてください

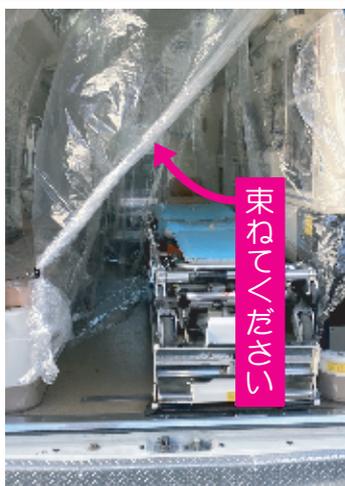

束ねてください



クリップで固定



患者様の頭部廻りはクリップを紐固定して落下防止処置を行ってください。



可能であればアングルはビスで打ち込んで固定を行ってください

ストレッチャーの乗降時はカーテンを開いて、手すりのクリップで留める事で、素早く行えます。

ご利用方法



酸素吸入器等は隙間から通してお使い下さい。



必要に応じて養生テープで補強をお勧めいたします



吸気・排気について（別売商品）




トヨタ ハイメディック用



日産 パラメディック用

エアコン延長ダクト

エアコンの風をダクトからカーテンの中に入れる事でカーテン内で空気を循環させてウイルス等が、できるだけ車内に留まらない仕組みにしております。

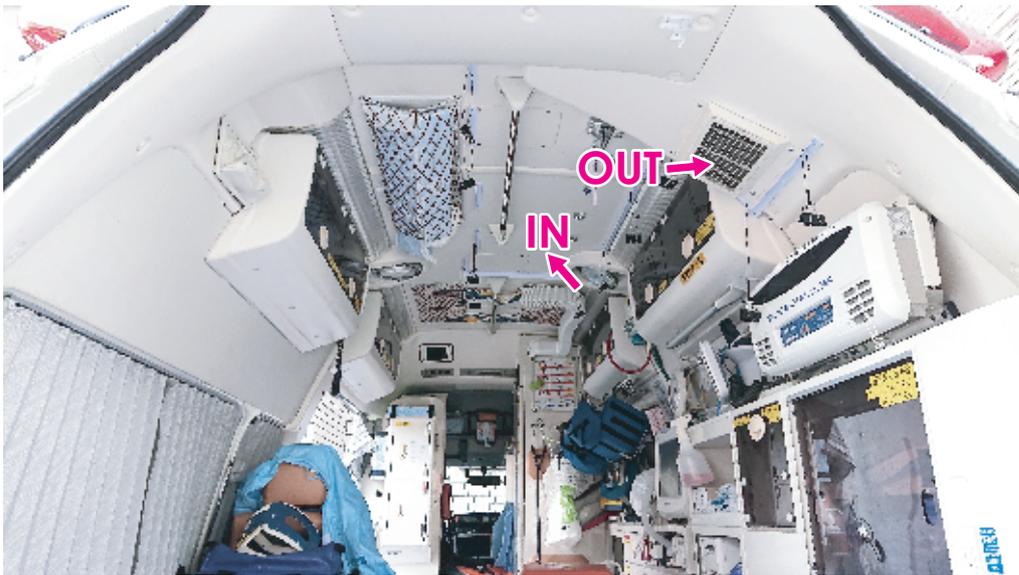

↑ 分割位置からダクトを挿入してご利用ください。

関連商品のご案内

まとめ購入もご相談ください

感染症対策ビニールカーテン
クリアで見やすい・破れにくい
さっと貼れて、さっと捨てる

2.1M×12.5M 巻
およそ 1.5 台分

